

Wasi-Steam 2 (REF 174992)

Inbetriebnahme des Dampfstrahlers nach einem Transport

Bitte vor Inbetriebnahme das Gerät gründlich spülen!

- Das Gerät mit dem Abfluss an die Tischkante stellen.
- Eimer bereit stellen.
- Mit dem Vierkant-Steckschlüssel vorsichtig das Ablassventil öffnen.
- Einen Wasseranschluss herstellen.
- Das Gerät einschalten (nicht aufheizen) und die Spültaste betätigen, bis nur noch klares Wasser herausfließt.
- Das Ablassventil schließen.
- Nun das Gerät befüllen.
- Das Gerät abschalten und das Ablassventil öffnen.
- Das Wasser ablaufen lassen. Dazu das Gerät in Richtung Ablassventil ankippen, damit alle Partikel abfließen können.
- Anschließend nochmals – diesmal mit bereits geöffnetem Ablassventil – spülen.
- Ablassventil schließen und Inbetriebnahme gemäß Betriebsanleitung durchführen.

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an!

Wassermann Service-Hotline 040/ 730 92 6 - 50



Durch diese Maßnahmen wird sichergestellt, dass eventuell während des Transports gelöste Kalkpartikel nicht die Plungerdichtungen im Magnetventil beschädigen.



Jede Inbetriebnahme und Handhabung an dem Gerät setzt die **genaue Kenntnis** und **Beachtung** der entsprechenden **Betriebsanleitung** voraus.

Download unter www.wassermann.hamburg

