


LSG-02 mit Universalsaughaube



LSG-02 mit Zwischenschublade

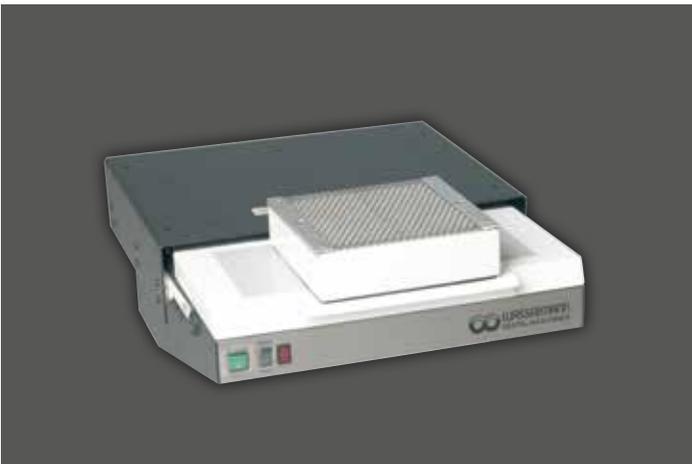

LSG-02 mit Monomer-Aktivkohle-Filter

Quality made in Hamburg · GERMANY

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe.

Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.wassermann.hamburg



/WassermannDentalmaschinen

Ihr Ansprechpartner _____

LSG-02 DE und LSG-02 D



Absauganlagen



Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com · www.wassermann.hamburg
www.facebook.com/WassermannDentalmaschinen

Absauganlagen

LSG-02 DE & LSG-02 D

Die technisch ausgereifte Absaug Schublade **LSG-02** ist absolut zuverlässig und auf den typischen Arbeitsablauf im Labor hin konzipiert. Das Gerät läuft bei eingeschalteter Betriebsbereitschaft automatisch an, sobald die Absaug Schublade vorgezogen wird. Ist eine Technikmaschine an die Absauganlage angeschlossen, läuft auch diese erst bei ausgezogener Saugschublade an. Gleichzeitig wird die Technikmaschine bei Einschieben der Schublade ausgeschaltet - ein Arbeiten ohne Absaugung ist somit ausgeschlossen.

Kollektorloser Motor, lange Laufzeit

Mit Halterahmen, einfache Montage

Für Dauerbetrieb geeignet, umschaltbar



Abnehmbare Schutzscheibe vor dem Arbeitsbereich

Vollständig aus Metall gefertigt

Optische Anzeige bei notwendigem Filterwechsel

Eigenschaften

- Komfortable und langlebige Einzelplatzabsaugung mit hohem Wirkungsgrad
- Abschaltautomatik bei Filtersättigung – gilt auch für Peripherie-Geräte
- Problemlose Installation, einfache Handhabung, schneller Filterwechsel
- Praktische Zubehörvarianten mit nachträglicher Montagemöglichkeit: Gold- und Schmutzschublade als Zwischenschublade optional erhältlich, ebenso ein Monomer-Aktivkohlefilter mit langer Haltbarkeit
- **LSG-02 DE:** Zusätzlich mit praktischer Einschaltautomatik für automatisches Einschalten der Absaugung über die Technikmaschine und integrierter Nachlaufautomatik für einen noch höheren Sicherheitsstandard und Gesundheitsschutz
- **Im Lieferumfang enthalten:**
Schutzscheibe, Acrylglas 195 x 176 x 3 mm
Mikro-Feinstaub-Filtertasche (gelb), Staubklasse M
Zuleitung

Zubehör	Artikel Nr.
Zwischenschublade (auch zum nachträglichen Einbau)	145005
Montagerahmen für KaVo-Tische	145006
Universalsaughaube inkl. Bodenplatte	145200
Modul Monomer-Aktivkohle-Filter, kpl.	145240
Ersatz-Monomer-Aktivkohle-Filter	610056
Ersatz-Mikro-Feinstaub-Filtertasche (gelb), Staubklasse M, 1 Satz = 3 Stück	611015
Ersatz-Filtertasche Gips (weiß), Kl.1 / Kl. 2, 1 Satz = 3 Stück	611017
LSG-02 DE	Artikel Nr. 145997
LSG-02 D	Artikel Nr. 145998
Spannung	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,5 A
Stromaufnahme Anschlussgerät	max. 2 A
Leistung	105 W
Maße B x H x T/T max.	445 x 190 x 505 mm / 720 mm
Gewicht LSG-02 DE	17,5 kg
Gewicht LSG-02 D	17,2 kg
Schallpegel	61 dB(A)
Saugleistung	360 m ³ /h (freiblasend)